



**Un par de electrodos de larga duración  
Modelo: PMLLPAD**

(para uso con la unidad de electroTHERAPY pain relief de Omron)  
Electrodos autoadhesivos con conectados a presión (98mm x 64mm)  
OmronPainRelief.com

Para uso de un solo paciente únicamente

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar los electrodos.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

**Aplicación**

Estos electrodos solo deben ser utilizados para aplicar estimulación eléctrica con la unidad de electroTHERAPY para el alivio del dolor de Omron (PM3030) y aplicados sobre piel normal, sana, seca y limpia de pacientes adultos únicamente.

- 1 sesión - 15 min. con apagado automático
- Máx. min. por sesión - 30 min. o 2 sesiones
- Máx. veces por día - 3 veces/día

**⚠ ADVERTENCIA** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría dar como resultado lesiones graves o incluso ser fatal.

**⚠ PRECAUCIÓN** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría derivar en lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente, o en daños al equipo u otros bienes.

**⚠** No use estos electrodos para estimulación si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.

No coloque los electrodos:

**⚠** Sobre el cuello porque esto podría causar espasmos musculares intensos y dar como resultado el cierre de sus vías respiratorias, dificultad en la respiración o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión arterial.

**⚠** A través del pecho porque la entrada de corriente eléctrica por su pecho podría causar alteraciones a su ritmo cardíaco, lo cual pudiera ser fatal.

**⚠** Sobre heridas abiertas o erupciones, o sobre zonas o erupciones inflamadas, enrojecidas o infectadas de la piel (p.ej., flebitis, tromboflebitis, venas varicosas).

**⚠** Sobre o cerca de lesiones cancerosas.

**⚠** Sobre zonas de la piel que carecen de sensación normal.

**⚠** En los lados opuestos de su cabeza ya que se desconoce el efecto de la estimulación al cerebro.

**⚠** Para estimulación, si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.

**⚠** El tamaño, la forma y el tipo de electrodos pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.

**⚠** Las características del funcionamiento eléctrico de los electrodos pueden afectar la seguridad y efectividad de la estimulación eléctrica.

**⚠** Usar electrodos demasiado pequeños o que estén incorrectamente colocados podría causar incomodidad o quemaduras a la piel.

**Precauciones**

- Se desconocen los efectos del uso de electrodos para estimulación eléctrica a largo plazo.
- Ya que se desconoce el efecto de la estimulación al cerebro, los electrodos no deben ser colocados en los lados opuestos de su cabeza.
- Tenga precaución si los electrodos se aplican sobre zonas de la piel que carecen de sensación normal.

**Reacciones adversas**

- Puede que experimente irritación a la piel y quemaduras debajo de los electrodos aplicados a su piel si se utilizaron por más tiempo de lo indicado: 30 min/sesión, hasta 3 veces/día.
- Puede que experimente dolores de cabeza u otras sensaciones de dolor durante o después de aplicar estimulación eléctrica cerca de sus ojos o a su cabeza y cara.

**CÓMO USAR LOS ELECTRODOS**

1. Retire y deseche la película plástica protectora de los electrodos.
2. Conecte cualquiera de los electrodos a cualquiera de los electrodos.
3. Coloque los electrodos solo sobre piel normal, intacta, seca, limpia y saludable.

**Notas:**

- Estos electrodos están destinados para ser utilizados por una sola persona. No comparta los electrodos con otras personas debido al riesgo de reacciones adversas de la piel y para prevenir la propagación de enfermedades.
- No use los electrodos después de la fecha de vencimiento.

**CUÁNDO REEMPLAZAR LOS ELECTRODOS**

Si el electrodos ya no se adhiere a su piel o si más del 25% de la superficie del electrodos no está en contacto con su piel.

**CÓMO LIMPIAR LOS ELECTRODOS**

1. Apague la unidad y retire el cable de cada electrodos.
2. Lave los electrodos cuando el lado adhesivo se ensucie y/o los electrodos no se adhieran a su piel.
3. Use las yemas de sus dedos para lavarlos delicadamente bajo agua fría.

- NO use esponjas, telas, detergentes, químicos o jabón.
- Los electrodos se pueden lavar hasta 10 veces y usar hasta 150 veces.
- Deje los electrodos secar al aire y NO los seque con papel o tela.

**ALMACENAMIENTO**

- No doble los electrodos.
- Entre usos, mantenga el cable conectado a los electrodos y coloque los electrodos en el portaelectrodos con el lado adhesivo hacia abajo en cada lado del portaelectrodos
- Enrolle el cable en el portaelectrodos.
- Almacénelo en un lugar frío y seco, 5-40°C (41-104°F), 30-80% de humedad relativa.
- Con un almacenamiento y uso adecuado, usted puede prolongar la duración de sus electrodos.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al 1- 800-634-4350.

Fabricado por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Hecho en Japón

Distribuido por: OMRON HEALTHCARE, INC.

1925 West Field Court

Lake Forest, IL 60045 U.S.A.

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.